

## Domácí inhalátor Macholda 1 kus



Tento výrobek je určený na domácí použití na provedení hygienických procedur v dutině nosní a dutině ústní s pomocí solného roztoku a éterických olejů.

~~Cena~~ ~~185,00 Kč~~

Prodejní cena se slevou

CENA (S DPH): 185,00 Kč

Sleva

[Ask a question about this product](#)

Výrobce [TML a.s.](#)

Při kašli, nachlazení, bronchitidě, bolesti hlavy.

Tento výrobek je určený na domácí použití na provedení hygienických procedur v dutině nosní a dutině ústní s pomocí solného roztoku a éterických olejů.

Způsob použití: Před použitím propláchněte inhalátor vroucí vodou v průběhu 3-5 minut. Poté,

co inhalátor vychladne, nalijte přes vrchní část (viz. obrázek) s pomocí injekční stříkačky 2 ml vody a 4-5 kapek éterického oleje. Pokud chcete použít jako inhalační směs lihovou tinkturu, nalijte ji také 2 ml. Poté je inhalátor připravený k použití.

Vdechnutí může být provedeno ústy nebo pomocí další trysky nosem. Maholdův inhalátor je jedinečné zařízení, které poskytuje vysoce účinný účinek esenciálních olejů na lidské tělo.

Inhalace přes dutinu ústní: Přiložte ústa k náustku. Vdech-ústy, výdech-nosem. Neprovádějte výdech ústy do inhalátoru, může tak dojít k vyprsknutí směsi z inhalátoru ven. Na zesílení účinku doporučujeme dolní část inhalátoru ponořit do nádoby s horkou vodou (50-60°C).

Inhalace přes dutinu nosní: Namočte náustek. Na něj nasadte gumovou násadku na nos. Přitlačte násadku na nos. Vdech-nos, výdech-ústa.

Po použití opláchněte inhalátor vroucí mýdlovou vodou (3-5 minut), opláchněte čistou vodou a vysušte.

Přístroj je vyroben z vysoce kvalitního lékařského skla bez použití syntetických materiálů.

Země původu: Ukrajina

Balení: 1 ks (skleněný inhalátor)

Výhody

- Připravenost k použití během 2-3 minut.
- Schopnost používat inhalátor ležící, sedící, stojící, chodit, cestovat, pracovat, na dovolené.
- Ekonomická spotřeba esenciálních olejů.
- Pohodlné balení.
- Přenositelnost a kompaktnost zařízení.
- Plná bezpečnost léčivých vlastností esenciálních olejů.
- Schopnost provádět studené a horké inhalace.

Odkaz na použití: [youtube.com/watch?v=A1GwVNYFOGI](https://www.youtube.com/watch?v=A1GwVNYFOGI)

---