

## Helicobacter pylori test na přítomnost bakterie 1 kus



Vysoce citlivý a spolehlivý test pro stanovení přítomnosti bakterie Helicobacter pylori, který je možné udělat si v pohodlí domova.

~~Cena~~ 299,00 Kč

Prodejní cena se slevou

CENA (S DPH): 199,00 Kč

Sleva

[Ask a question about this product](#)

Výrobce [Biotech](#)

---

Vysoce citlivý a spolehlivý test pro stanovení přítomnosti bakterie *Helicobacter pylori*, který je možné udělat si v pohodlí domova.

testem se určí momentální infekce helikobakterem,  
vhodný také ke kontrole úspěšnosti léčby infekce, ne dříve než 6 týdnů po ukončení léčby,  
diagnózu potvrdí lékař na základě klinických a laboratorních výsledků.

V současné době existuje několik typů testů k určení přítomnosti bakterie *Helicobacter pylori*. Test na helikobaktera, který vám nabízíme my, lze však oproti ostatním učinit velmi jednoduše v pohodlí vašeho domova. Jedná se o rychlotest helikobaktera ze stolice zaručující spolehlivý výsledek již do 10 minut.

Test je určen k určení přítomnosti bakterie ve stolici a také na kontrolu úspěšnosti léčby (ne dříve než 6 týdnů po ukončení léčby). Přesnost výsledků testu na *Helicobacter* ze stolice jsou vyšší než 99% což znamená, že je vysoce přesný a spolehlivější než dechový test, který se diagnostikuje ambulantně, častokrát za vysokou cenu.

Průběh samotného testování helikobaktera ze stolice má několik fází:

Odebrání vzorku ze stolice

V ideálním případě by neměla být odebrán příliš velký vzorek ze stolice, protože to by mohlo mít za následek zkreslení výsledků testu. Odebraný vzorek by měl být co nejčerstvější. V případě pozdějšího testování odebraného vzorku je nutné vzorek uschovat v plastovém sáčku a skladovat při nižších teplotách.

Vykonání testu

Průběh testu se doporučuje provádět při pokojové teplotě. Obal testu otevřete až před použitím testu. Vzorek v nádobce byste měli důkladně zatřepat, aby byl vzorek ze stolice promíchán. Následně je nutné odlomit hrot víčka nádoby se vzorkem a opatrně kápnout 2-3 kapky na políčko S na testeru. Počkat 10 minut, dokud se test vyhodnotí.

Vyhodnocení

Pokud se během reakčního času 10 minut na testeru objeví 2 čárky, test na *Helicobacter* ze stolice je pozitivní. Pokud se objeví jen 1 čárka, test helikobaktera je negativní a v případě, že se neobjeví žádná čárka, test na helikobaktera je neplatný.

Upozornění při vyhodnocování testu: Pokud se na testu objeví buď jen náznak druhé čárky (někdy bývá slabě viditelný), test se považuje za pozitivní. Test je negativní pouze v případě, že je zřetelná jen jedna čárka. Test na *Helicobacter pylori* je určen pouze k zevnímu použití. V případě nejednoznačného výsledku testu počkejte 15 minut, případně test opakujte. Výsledky testu by měly být hodnoceny s ve spojitosti s dalšími klinickými nálezy. Během průběhu testu dodržujte zásady správné hygieny. Test na *Helicobacter* uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Obsah balení:

1x fóliové balení s testovací kazetou a prostředkem na pohlcování vlhkosti

1x návod k použití

1x nádobka na vzorek s tekutinou a etiketou pro jméno pacienta

Princip

Metoda využívá kombinaci barevného konjugátu a imobilizovaných protilátek *H. pylori*. Za přítomnosti antigenu se vytváří komplex antigen-protilátka-barvivo, který se projeví viditelnou růžovou čárkou v testovací zóně destičky (zóna T). Komplex dále vzlíná do kontrolní zóny C, kde vytváří růžovou čárku, která dokazuje, že test byl proveden správně. Přítomnost antigenu je detekovatelná do 10 min.

Skladování: Test na helikobakter je nutné skladovat při pokojové teplotě.

Výrobce: Hangzhou Clogene Biotech Co., Ltd., No.1 Yichuang Road, Hangzhou Čína

Zastoupení pro EU: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Hamburg, Germany

---